

LevelOne – Système transbuccal

Guide rapide

Configuration

Trocart (50-501-05-07)

Manche (50-501-01-07)

Canule

50-501-15-07
Canule avec une pointe

50-501-16-07
Canule avec double pointe

50-501-17-07
Canule lisse

Le trocart est inséré à travers la canule, poussé jusqu'à encliquettement puis fixé par une légère pression suivie d'une rotation dans le sens horaire

La canule est introduite dans le manche par le bas et bloquée par une pression sur le bouton latéral

Application

3

Incision

4

Le trocart avec la canule est introduit dans le tissu mou

5

Le trocart est retiré (par rotation dans le sens anti-horaire)

Douille de perçage

50-501-25-07
Ø 1,5 mm
Douille de perçage

50-501-22-07
Ø 2,0/2,3 mm
Douille de perçage

50-501-27-07
Ø 2,7 mm
Douille de perçage, reconstr.

50-501-26-07
universelle
Douille de perçage, courte

Écarteur de joue

50-501-10-07
fermé

Adaptateur pour plaque

50-501-34-07
Ø 2,0 mm
Adaptateur pour plaque

50-501-33-07
Ø 2,3 mm
Adaptateur pour plaque, fracture

50-501-37-07
Ø 2,7 mm
Adaptateur pour plaque, reconstr.

6

L'écarteur de joue est positionné au-dessus de la canule et fixé selon l'angle voulu (la conception avec roue dentée permet un réglage individuel de l'angle)

7a

Ostéosynthèse par vis de réglage
La douille de perçage adaptée (la couleur correspond au diamètre de vis) est insérée jusqu'à encliquettement puis fixée par une rotation dans le sens horaire

7b

En option pour ostéosynthèse par plaque
La plaque est fixée sur l'adaptateur pour plaque (par pression)

7b

La plaque et l'adaptateur pour plaque sont montés sur la canule en intrabuccal

8

Le trou de vis est préforé à travers la douille de perçage avec une mèche adaptée (longueur de mèche recommandée : au moins 70 mm)

9

La douille de perçage est retirée (par rotation dans le sens anti-horaire)

10

La vis est introduite à travers la canule au moyen d'un tournevis

Remarque : Ceci est un mode d'emploi sommaire destiné aux utilisateurs déjà familiarisés avec le système. Tous les détails n'y sont donc pas contenus. Les informations figurant dans ce Guide rapide visent à présenter l'emploi des produits de KLS Martin Group. Vous trouverez une liste complète des domaines d'application, contre-indications, avertissements, mesures de précaution et informations pour la stérilisation dans les modes d'emploi correspondants. Lisez toujours le mode d'emploi avant d'utiliser un produit de KLS Martin Group. Les utilisateurs doivent toujours se fier à leur propre jugement clinique pour décider quels produits et quelles techniques utiliser pour leurs patients.